

Telefon ( 0481 ) 61040 / 61049  
Telefax ( 0481 ) 65180  
Westerweide 28  
25746 Heide



### **Hinweise zur Pflege Ihres neuen, herausnehmbaren Zahnersatzes**

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Zahnersatz haben, sollten Sie einiges beherzigen:

Mindestens einmal täglich muss der Zahnersatz beidseitig gründlich gereinigt werden.

Optimal ist das Reinigen unter fließendem, warmen Wasser mit einer weichen Zahnbürste und einem Reinigungsmittel, welches wenig Schleifkörperchen enthält. Zahngel hat die beste säubernde und gleichzeitig pflegende Wirkung.

Um Beschädigungen oder Brüche Ihres neuen Zahnersatzes zu vermeiden, ist es ratsam das Waschbecken mit einem Handtuch oder Ähnlichem auszukleiden.

Häufiger Konsum von Kaffee, Tee, Nikotin, einigen Obstsorten (z. B. Blaubeeren) und in Ausnahmefällen auch einiger Medikamente kann Verfärbungen des Zahnersatzes verursachen. Dann sollte eine Reinigung vermehrt erfolgen.

Die Verwendung von aggressiven Reinigungslösungen oder chemischen Wirkstoffen wird nicht empfohlen – meist sind diese Mittel eher schädlich.

Gute Erfahrungen haben wir hingegen mit dem Curaprox BDC weekly gemacht, aber auch dieses Reinigungsmittel sollte nur selten und sparsam verwendet werden. 1X wöchentlich ist völlig ausreichend.

#### [Verwendung von CURAPROX BDC weekly im Ultraschallbad](#)

- ca. 1cl in die Ultraschallbadwanne ( der Boden sollte leicht bedeckt sein ) geben und mit lauwarmen Wasser auffüllen
- Gerät laut Herstellerangaben starten und beenden

Versuchen Sie niemals Ihren Zahnersatz selbst anzupassen oder zu reparieren. Probleme mit feinmechanischen Verankerungen oder Druckstellen an Ihrer Prothese gehören in die Hände eines Fachmannes.

